

## Návod na používanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto výrobku. Prosíme prečítajte si pozorne tento návod. Návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.

### Účel použitia výrobku

Podpera na vstávanie uľahčí najmä seniorom a horšie pohyblivým osobám vstávanie z WC, postele, stoličky a pod. Pred montážou vybalte jednotlivé diely z balenia.

### Balenie obsahuje:

- 2ks zvislej konštrukcie s madlami
- 2ks prepojovacej konštrukcie (ohnuté rúrky)
- 8ks dlhých skrutiek s maticami

### Montáž

- 1) Pomocou dlhých skrutiek spojte prepojovaciú konštrukciu so zvislou konštrukciou.  
Vid' obrázok:
  - jedna prepojovacia rúrka spája spodné diely zvislých konštrukcií
  - jedna prepojovacia rúrka spája bočné diely zvislých konštrukcií.
- 2) Prekontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matic, aby nedošlo ku zraneniu.

### Používanie

Osoba sa oprie rukami o madlá a vytiahne sa nahor.

### Čistenie a údržba

Kovové rúrky utrite navlhčenou handričkou a utrite dosucha.  
Penové časti madiel nevlhčite.

### Upozornenie:

Tento výrobok nie je zdravotníckym prostriedkom.  
Pravidelne kontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek a matic.  
Nosnosť do 100kg.